

## Pesario



## Símbolos

Es posible que se utilicen símbolos en algunas etiquetas del paquete para facilitar su identificación.



Fabricante\*



Número de lote



El producto cumple con los requisitos de la directiva 93/42/EEC para dispositivos médicos

0434



Representante autorizado en la Unión Europea



¡Precaución! Consulte las advertencias y precauciones

**Rx ONLY**

Las leyes federales (de los EE.UU.) restringen la venta de este dispositivo por prescripción de un médico o facultativo



Número de catálogo



Consulte las instrucciones de uso



No contiene látex

\*Empresa responsable por un dispositivo comercializado con su propio nombre, independientemente de si es "fabricado para" o "fabricado por" la empresa.

### Manufacturer

Integra York PA, Inc. ■ 589 Davies Drive, York, PA 17402  
866-854-8300 USA ■ +1 717-840-2763 outside USA ■ +1 717-840-9347 fax  
[integralife.com/integra-miltex](http://integralife.com/integra-miltex)

### Manufacturer

Panpac Medical Corporation ■ 6F-2, No. 202, Sec. 3, Ta-Tong Rd.,  
Shi-Chih Dist., New Taipei City ■ TAIWAN, R.O.C. ■ Phone: (886)-2-8647-2242  
Fax: (886)-2-8647-2770

### EU Representative

WeilKang Ltd ■ Suite B, 29 Harley Street ■ LONDON, W1G 9QR, U.K.



Integra, the Integra logo, and Miltex are registered trademarks of Integra LifeSciences Corporation or its subsidiaries in the United States and/or other countries. © 2013 Integra LifeSciences Corporation. All Rights Reserved. SURG-IFU-PESSET Rev. C 10/13

## Integra® Miltex®

### Juego de colocación de pesario Instrucciones de uso/Español



EC REP



LOT



⚠



i

**Rx ONLY**



0434

### Descripción

El juego de colocación de pesario ayuda a determinar el estilo y tamaño correctos de pesario para cada paciente. Contiene seis pesarios de anillo comunes y una tabla de referencias cruzadas grabada para seleccionar el pesario adecuado. **El juego de colocación de pesario se entrega sin esterilizar.**

### Instrucciones de limpieza y esterilización

1. Limpieza: Sumerja en limpiador enzimático durante 20 minutos. Retire del limpiador enzimático y enjuague bien con agua desmineralizada. Deje secar bien antes de esterilizar.
2. Desinfección: Remoje en solución desinfectante por 12 minutos. Lea y respete las instrucciones de uso del fabricante de la solución desinfectante. Retire de la solución desinfectante y enjuague bien con agua desmineralizada. Deje secar bien antes de esterilizar.
3. Parámetros de esterilización recomendados:

Esterilizador	Temperatura de exposición	Tiempo de exposición	Tiempo mínimo de secado
Prevacío (envuelto)	132°C (270°F)	4 minutos	20 minutos
Prevacío (sin envoltorio)	132°C (270°F)	4 minutos	-
Vapor por gravedad	121°C (250°F)	30 minutos	30 minutos
Vapor por gravedad	132°C ~ 135°C (270°F ~ 275°F)	10 minutos	30 minutos

### Política de devolución de productos

Los productos deben devolverse en paquetes sin abrir, con los sellos del fabricante intactos para ser aceptados para reemplazo o crédito, a menos que se devuelvan debido a defecto del producto. Integra determinará si el producto es defectuoso. Los productos no se aceptarán para reemplazo si han estado en manos del cliente por más de 90 días.

### Divulgación de la información del producto

INTEGRA Y SUS SUBSIDIARIAS ("INTEGRA") Y EL FABRICANTE RECHAZAN TODAS LAS GARANTÍAS, SALVO LA GARANTÍA CONVENCIONAL VIGENTE DE INTEGRA, YA SEAN EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS ENTRE OTRAS, TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. NI INTEGRA NI EL FABRICANTE SERÁN RESPONSABLES DE PÉRDIDAS FORTUITAS O EMERGENTES, DAÑOS O GASTOS QUE SURJAN EN FORMA DIRECTA O INDIRECTA DEL USO DE ESTE PRODUCTO. NI INTEGRA NI EL FABRICANTE ASUMEN O AUTORIZAN A NINGUNA PERSONA A ASUMIR POR ELLOS NINGUNA OBLIGACIÓN O RESPONSABILIDAD ADICIONAL RELACIONADA CON ESTOS PRODUCTOS.